

ISTRUZIONI IN ITALIANO

⚠ AVVERTENZE

AVVERTENZA: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE DI MONTAGGIO PRIMA DELL'UTILIZZO. PER ASSICURARE LE PRESTAZIONI ADEGUATE DEL TUTORE, SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI.

AVVERTENZA: LADDOVE AVVERTA O MANIFESTI UN AUMENTO DEL DOLORE, GONFIORE, IRRITAZIONE CUTANEA, O QUALSIASI REAZIONE AVVERSA MENTRE UTILIZZA QUESTO PRODOTTO, CONSULTI IMMEDIATAMENTE IL SUO MEDICO.

AVVERTENZA: QUESTO DISPOSITIVO NON PREVIENE NÉ RIDUCE ALCUNA TIPOLOGIA DI INFORTUNIO. UNA CORRETTA RIABILITAZIONE E UNA MODIFICA DELL'ATTIVITÀ MOTORIA COSTITUISCONO UNA PARTE ESSENZIALE DI UN CORRETTO PROGRAMMA DI TRATTAMENTO. CONSULTARE IL PROPRIO OPERATORE SANITARIO AUTORIZZATO IN MERITO ALLA SICUREZZA E AL CORRETTO LIVELLO DI ATTIVITÀ MOTORIA NECESSARI QUANDO INDOSSA QUESTO DISPOSITIVO.

ATTENZIONE: SEGUIRE LE PROCEDURE DI UTILIZZO E IL PROCESSO DI CURA DESCRITTI NELLE ISTRUZIONI.

ATTENZIONE: ESCLUSIVAMENTE MONOPAZIENTE.

APPLICARE LA GINOCCHIERA



A. Afferrare i lembi della ginocchiera dal lato dell'apertura più ampia. Infilare la ginocchiera, tirandola su fino al ginocchio in modo tale che l'apertura sulla parte anteriore circonda la rotula.

FISSARE LE CINGHIE

B. Cominciando dalla cinghia inferiore, inserire le cinghie negli anelli a D e chiuderle. La vestibilità deve essere aderente ma non troppo stretta, per evitare di bloccare la circolazione.

ISTRUZIONI PER LA CURA E IL LAVAGGIO

C. Lavare a mano in acqua fredda con un detergente non aggressivo, sciacquare e stendere lasciando asciugare all'aria.

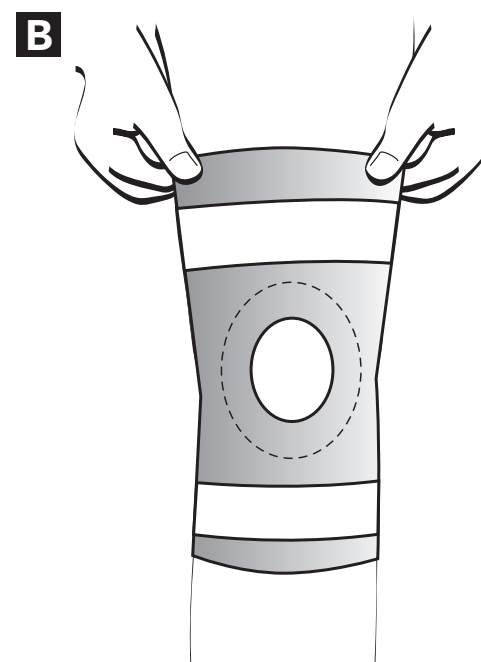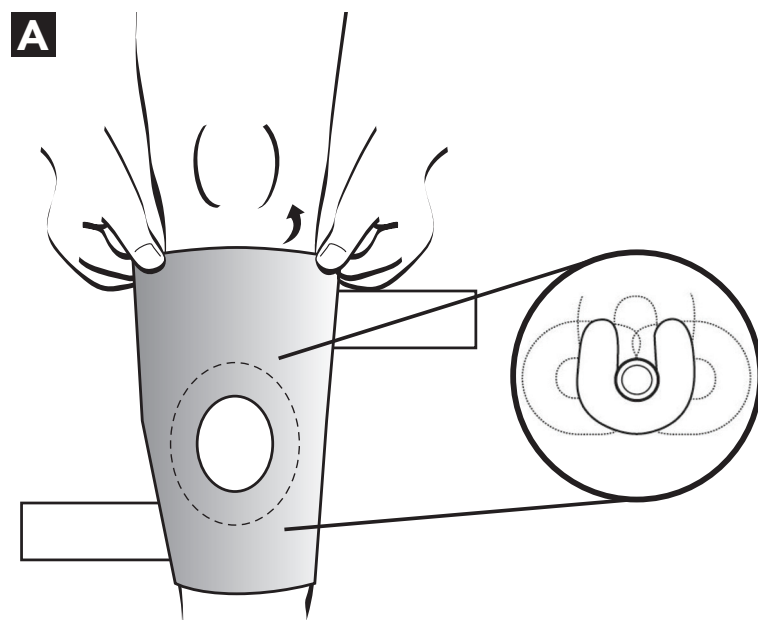

Buttress Support

FITTING INSTRUCTIONS

SWEDISH

DANISH

FINNISH

NORWEGIAN

ROMANIAN

DUTCH

POLISH

GERMAN

ITALIAN



Breg, Inc.

2382 Faraday Avenue, Suite 300

Carlsbad, CA 92008 U.S.A.

P: 800-321-0607

F: 800-329-2734

www.breg.com

©2023 Breg, Inc. All rights reserved.

AW-1.04116 Rev B 10/23



E/U authorized representative

MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover

Germany

